



MANUAL DE USUARIO

ZAR - CQP - 20

Quiropráctica

Zarmex Oficial

ZARMEX

Ofrecemos calidad en cada uno de nuestros productos y servicios

Zarmex inició ofreciendo servicios médico-dentales y de optometría. Con el tiempo, ha expandido su catálogo a áreas como podología, quiropráctica, otorrinolaringología, ginecología y fisioterapia. Su crecimiento ha sido impulsado por la innovación y la calidad en la manufactura y mantenimiento de equipos médicos.

TÚ GUÍA INTERACTIVA

Nuestro manual incluye un menú dinámico diseñado para facilitar tu experiencia de navegación. A través de él, puedes acceder rápidamente a las secciones que necesites sin tener que buscar manualmente. Solo haz clic en el título o apartado que te interese, y serás dirigido directamente a esa parte del documento.

MENÚ

[INTRODUCCIÓN](#)

[PIEZAS](#)

[INSTALACIÓN](#)

[GARANTIA](#)

[MANTENIMIENTO](#)

[RECOMENDACIONES](#)

[CONTACTO](#)

BIENVENIDO A LA EXPERIENCIA ZARMEX

¡Gracias por adquirir nuestro equipo!

Te compartimos tu manual el cual ha sido diseñado para proporcionarte una guía clara y concisa sobre el uso, mantenimiento y características técnicas del modelo descrito, tu equipo está pensado para ofrecer comodidad, eficiencia y durabilidad en entornos profesionales.


Te recomendamos leer detenidamente tu manual antes de su uso para garantizar un funcionamiento óptimo y seguro.

PÓNLO EN MARCHA EN MINUTOS

En Zarmex, pensamos en tu comodidad desde el primer momento. Por eso, entregamos cada equipo completamente ensamblado, listo para usarse, sin que tengas que preocuparte por armado o instalación complicada.

Sabemos que tu tiempo es valioso, nuestro objetivo es que recibas un equipo práctico, funcional y sin complicaciones, como debe ser. En Zarmex, estamos contigo en cada paso.

TU EQUIPO ZARMEX PIEZA POR PIEZA

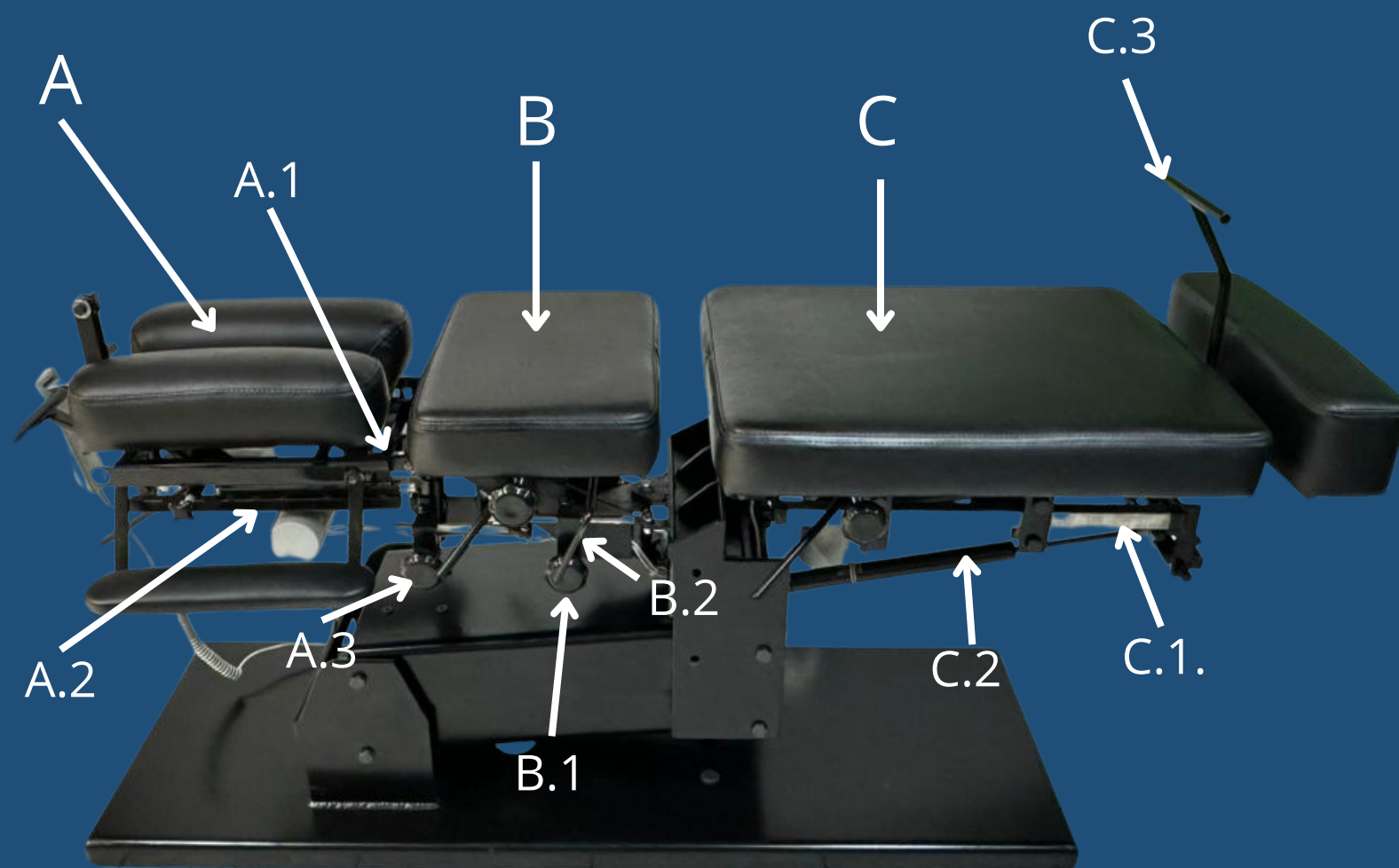


A. Sección Cervical: Drop cervical a 45° con activación mediante perilla y palancas. **A.1:** Tracción cervical eléctrica con desplazamiento hasta 10 cm con control manual. **A.2:** Incluye pistón para la extensión y flexión cervical. **A.3:** Lateralidad cervical hasta 25° con activación de perilla.

B. . Sección Torácica: Drop torácico con activación manual de perillas y palanca. **B.1:** Perilla para realizar movimiento de lateralidad. **B.2:** Palanca para movimiento de embarazadas. Sección A y B realizan movimiento en conjunto para lateralidad de escoliosis.

C. Sección Pélvica: Drop pélvico con activación de perillas y palanca. **C.1:** Tracción lumbar eléctrica hasta 15 cm con control manual. **C.2:** Movimiento pélvico para flexión lumbar manual con sistema de pistón hasta 45°. **C.3:** Barra de apoyo para flexión lumbar manual.

TU EQUIPO ZARMEX PIEZA POR PIEZA

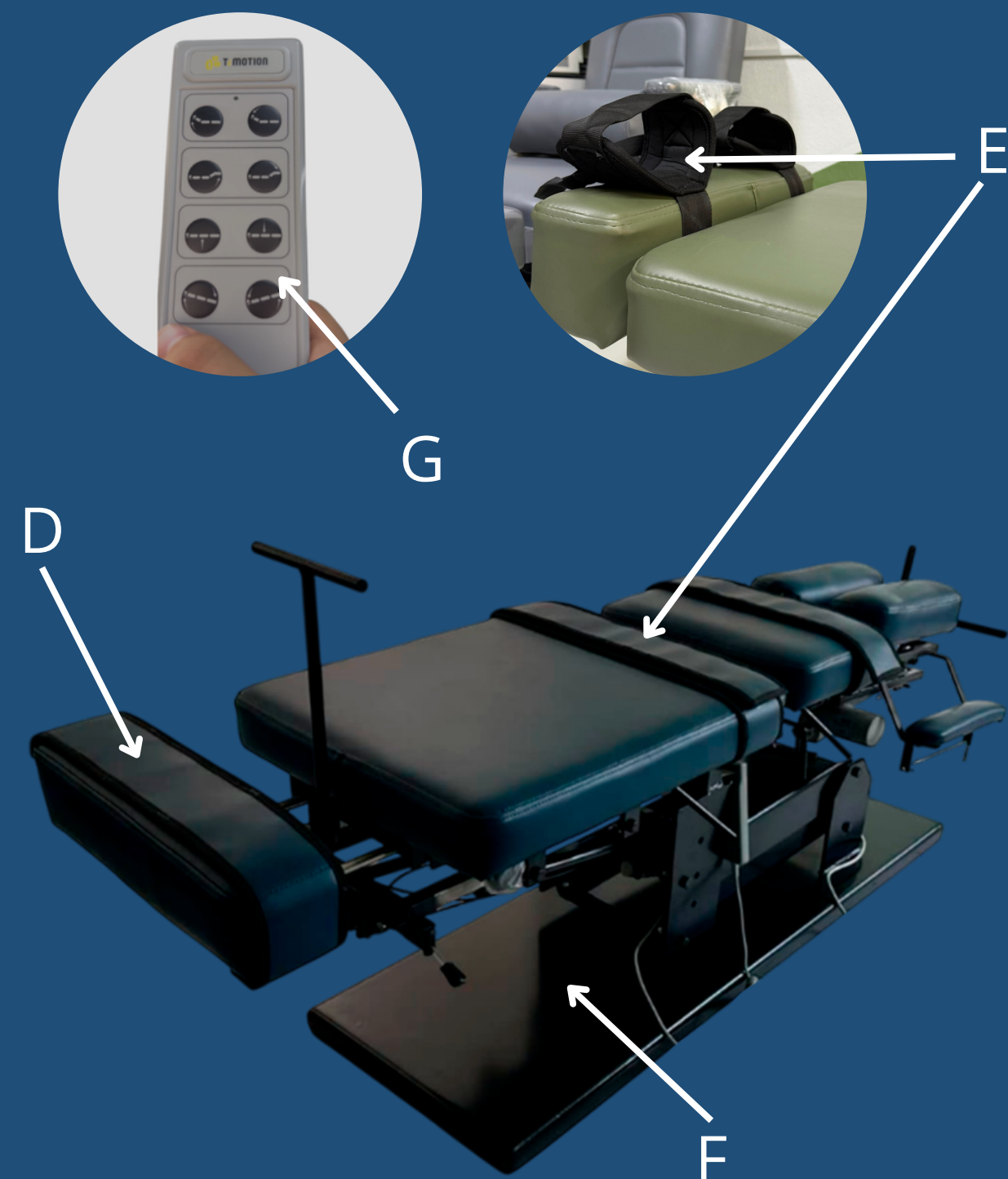

D. Piecera: Ajuste para comodidad del paciente de hasta 15 cm.

E: Sujetadores para el paciente: Tobilleras y cinta pélvica.

F. Estructura Metálica: La estructura proporciona soporte al sistema de flexión y tracción lumbar junto al mecanismo de ascenso y descenso. Además alberga el motor y los pistones, garantizando la estabilidad y el correcto funcionamiento del equipo.

G. Control de mano: Permite realizar los movimientos de tracciones, ascenso/descenso y flexión/extensión cervical de manera sencilla. Sustituye al control de pie, proporcionando mayor comodidad en espacios reducidos.

GARANTÍA

Condiciones

- Es necesario presentar la póliza, la factura o nota de compra y llevar el producto a la dirección de ZARMEX.
- Para más información ZARMEX se compromete a reparará o sustituirá el producto o sus piezas defectuosas sin costo, incluyendo el envío o transporte.
- ZARMEX se reserva al derecho a remplazar el equipo.

Duración

La garantía ofrecida por ZARMEX tiene una vigencia de un año a partir de la fecha de compra, y cubre todas las partes del producto contra defectos de fabricación o fallas en su funcionamiento.

Anulación:

La garantía se pierde por mal uso, no seguir el instructivo o reparaciones no autorizadas.

Exclusiones:

No cubre daños por voltaje, mal uso, desgaste normal o falta de documentos.

Condiciones extra:

ZARMEX puede enviar un técnico o dar un equipo provisional si aplica. No se aceptan garantías verbales.



SERVICIO DE MANTENIMIENTO

En nuestra página web contamos con una sección específica donde puedes detallarnos el problema que presenta el modelo. Una vez recibido tu mensaje, nos comunicaremos contigo de inmediato para brindarte una solución.

Mantenimiento preventivo :

Se recomienda realizar mantenimiento básico regularmente: limpiar el polvo, revisar tornillos.

Limpieza:

Zarmex recomienda que, para una mejor limpieza de tu equipo, especialmente en las áreas forradas con vinil, utilices silicón en crema o productos base en crema y un trapo de microfibra. Esto garantizará un mejor cuidado y mantenimiento de tu equipo.

RECOMENDACIONES

- Guarda la garantía y factura en un lugar seguro.
- Usa el equipo solo para su propósito original.
- Revisa tornillos y partes móviles regularmente.
- Coloca el equipo en una zona seca.
- Mantenga limpio el vinil (Limpie con un trapo húmedo)
- Ajustar la velocidad y dirección de la flexión lumbar usando el control manual.
- Activar los drops pélvico, torácico y cervical de manera controlada, asegurando la posición correcta del paciente.
- Comprobar que el sistema de freno del motor funcione correctamente.

Contacto



zarmex.mexico@gmail.com



55 8136 6555




zarmexoficial.com



soporte.zarmex@gmail.com



Organillero 317 Benito Juárez
Nezahualcóyotl, 57000 Ciudad de
México, Méx.

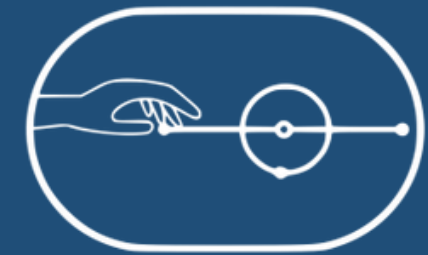

ZARMEEX
UN CONCEPTO DE CALIDAD



ZARME

UN CONCEPTO DE CALIDAD